

Diagnostix™ 952B



- Instructions de montage mural
- Liste des pièces Schematics
- Entretien

ADC[®]
AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

MONTAGE MURAL

INSTRUCTIONS (1 SUR 2)

Outils nécessaires

- Tournevis à fente moyenne
- Marteau
- Foret avec foret de 3/16 "

Instructions de Montage Mural

1. L'unité peut être montée au mur sans démonter l'unité principale à partir du support pivotant / support mural. Positionnez le support pour que le centre de l'unité soit à environ 4'6 "du sol. À l'aide d'un crayon, marquer les trous de chaque côté du support mural.

2. Vérifiez le niveau et percez les trous 3/16 "d'environ 7/8" de profondeur. Tenez doucement les 2 ancrages à vis dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient au ras du mur.

3. Positionnez le manomètre et le support et montez sur le mur à l'aide des vis fournies. Veillez à ne pas trop serrer les vis. Placez le panier de manchette à environ 2 "à droite du manomètre.

4. À l'aide d'un crayon, marquez les 3 trous comme précédemment. Répétez la procédure pour percer les trous, insérer des ancrages et monter.

5. Fixez une longueur de 8 pieds de tube enroulé à l'entrée d'air sous le support de montage. Insérez le connecteur luer «mâle» sur l'extrémité libre du tube enroulé sur le connecteur luer «femelle» sur le tube de vessie. Enroulez le brassard autour de l'ampoule et rangez-le dans le panier.

Important: Cet instrument est conçu pour permettre le montage mural sans avoir à démonter l'unité principale à partir de sa base pivotante / support de montage.

Pour retirer l'unité principale du support, débranchez le tube du support de montage. Dévissez l'aile du bas du support de fixation, séparant l'unité principale du support. Procédure inversée pour réassembler #.

MONTAGE MURAL INSTRUCTIONS (2 SUR 2)




CONNEXION DU SYSTÈME D'INFLATION AU MANOMÈTRE

Retirez le capuchon de sécurité rouge qui scelle le réservoir contenant du mercure (sur le 952, le capuchon de sécurité rouge se trouve sur l'entrée d'air sous la base pivotante). Fixez fermement l'extrémité du réservoir à l'entrée d'air. Retirez le capuchon de sécurité rouge pour une utilisation ultérieure. Lors du transport d'un instrument au mercure, nous recommandons de placer le capuchon de sécurité rouge sur le réservoir.


Remarque: Il est normal que des quantités négligeables de gouttelettes résiduelles de mercure s'accumulent autour de l'entrée d'air sous le capuchon de sécurité rouge pendant le transport.

ENTRETIEN

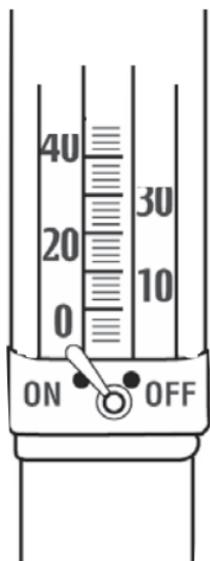


Pour verrouiller le mercure dans le réservoir: Inclinez l'ensemble de l'unité 45° vers le réservoir pour permettre au mercure de s'écouler hors du tube de cartouche et dans le réservoir. Lorsque le tube de la cartouche est complètement vide de ALL mercury (et s'il est encore incliné 45°), déplacez le levier de verrouillage vers la droite "OFF". Mercury devrait être verrouillé dans le réservoir pendant la maintenance ou le transport. Pour libérer du mercure, déplacer le levier sur la position "ON". Si nécessaire, inclinez l'unité vers le tube pour permettre au mercure de s'écouler hors du réservoir.

Soulevez le mécanisme EZ-Tube™ chargé par ressort situé en haut de l'instrument. Inclinez l'instrument vers l'avant en tube libre. Si nécessaire, utilisez un petit tournevis à tête plate pour aider à déloger le haut du tube. Pour remplacer le tube, soulevez le mécanisme EZ-Tube™ et insérez la base du tube dans l'unité principale, en vous assurant que les marques de graduation se retrouvent. Ensuite, positionnez le sommet du tube et relâchez le mécanisme EZ-Tube™.

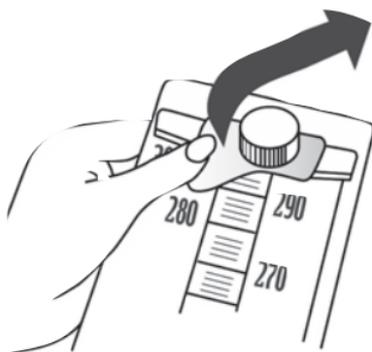


LISTE DES PIÈCES SCHÉMATIQUES (1 DE 2)

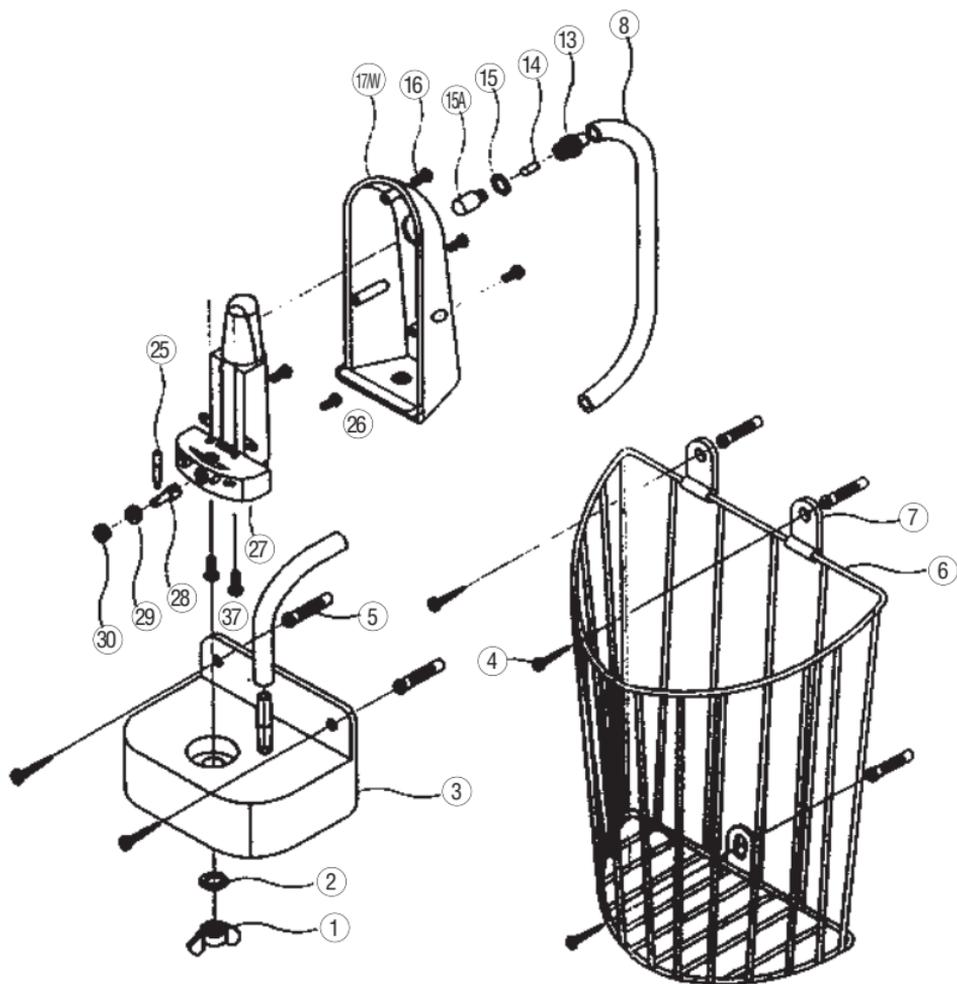

LISTE DES PIÈCES SCHÉMATIQUES (2 DE 2)

UNITÉ 952B

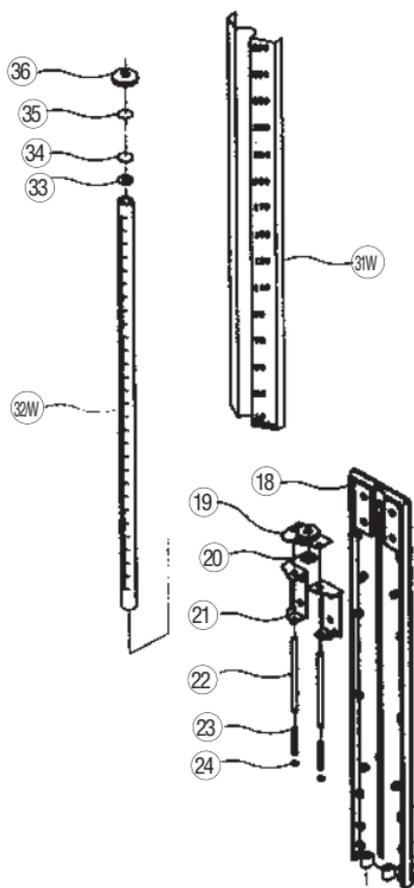

Réf #	Article #	Description
1	952-101	Noix de papillon
2	952-102	Rondelle équipéee
3	952-103	Support de montage
4	952-104	Vis de panier (5)
5	952-105	Molleys (5)
6	952-025	Panier de manchette
7	952-107	Clips de panier (2)
8	952-108	Tube en caoutchouc
13	952-109	Connecteur de réservoir
14	952-110	Filtre en coton
15	952-111	Joint de connecteur de réservoir
15A	952-112	Tubulure du réservoir
16	952-113	Vis de couverture de réservoir (3)
17W	952-114	Couverture de réservoir
18	952-115	Porte-plaque à échelle
19	952-116	Cartridge Top Plate
20	952-117	Joint en caoutchouc
21	952-118	Porte-réservoir pour plaque supérieure
22	952-119	Tiges (2)
23	952-120	Ressorts (2)
24	952-121	Rondelles de verrouillage (2)
25	952-122	Poignée de levier de verrouillage
26	952-123	Vis de réservoir (2)
27	952-124	Reservoir Tank
28	952-125	Barre de réservoir
29	952-126	Douille
30	952-127	Vis de verrouillage
31W	952-128	Plaque d'écaillés
32W	952-129	Tube de cartouche de plastique gradué
33	952-130	Joint en caoutchouc
34	952-132	Bouchon de filtre
35	952-131	Diaphragme
36	952-133	Capuchon à vis
37	952-134	Vis à base de réservoir (2)

Pour enregistrer votre produit, visitez-nous à www.adctoday.com et suivez les liens



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788

tél: 631-273-9600, 1-800-232-2670
télécopieur: 631-273-9659

www.adctoday.com

email: info@adctoday.com



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom